


Instrukcja pobierania próbek DNA



Jak pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka

1 godzinę przed pobraniem nie jedz, nie pij, nie żuj gumy, nie pal papierosów. Możesz pić czystą wodę.

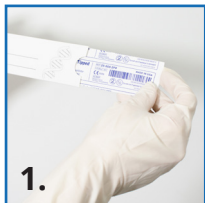


1.

Wymij papierowe opakowanie z kartonowej wsuwki




2.

Otwórz papierowe opakowanie i wyjmij 1 wymazówkę

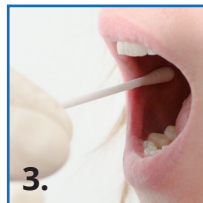

3.

Włóż wymazówkę do ust i potrzymaj ją 10x prawy policzek

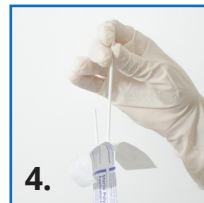

4.

Umieść wymazówkę z powrotem do papierowego opakowania



Wymij drugą wymazówkę i powtórz czynność na lewym policzku




6.

Papierowe opakowanie z pobranymi wymazami włóż do kartonowej wsuwki



7.

Podpisz wsuwkę: imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia (nie dotyczy badania anonimowego)

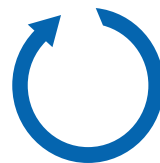

Powtórz czynność 1-7 dla każdego uczestnika badania

Jak pobrać i zabezpieczyć próbki dyskretne tzw. mikroślady


Szczoteczka do zębów, guma do żucia, włosy, szklanka, kubek itp.

ZALECENIA

Nie dotykaj gołymi rękami miejsc w których może znajdować się DNA. Zanim zbierzesz mokre próbki poczekaj aż wyschną. Dzięki temu nie zapleśnieją. Każdy mikrośląd musi być oddzielnie zapakowany i opisany.




Jeśli to możliwe załóż rękawiczki

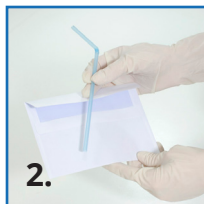

Ślad biologiczny włóż do czystej papierowej koperty



Zamknij i podpisz do kogo należy próbka

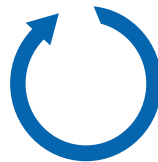

Powtórz czynność 1-3 dla każdego uczestnika badania



Próbki szklane tj. np. szklanka, kubek itp. najlepiej włożyć do pojemnika spożywczego lub kartonu i dodatkowo zabezpieczyć przed przemieszczaniem folią bąbelkową lub papierem.

Pobrane próbki odbierzemy kurierem

Szybko i wygodnie z dowolnego adresu

Zamów **BEZPŁATNEGO KURIERA**

 **800 007 770**

(numer bezpłatny dla każdego)

 **534 942 008**

(numer komórkowy)



Pon-Pt: 7.00 - 23.00 / weekendy i święta: 8.00 - 21.00

www.centrumdna.pl/kurier

